

CONTACTA SOLUTION SOLUZIONE UNICA

PER TUTTI I TIPI DI LENTI A CONTATTO MORBIDE


DISINFETTA, CONSERVA, RISCIAQUA, DETERGE, IDRATA, RIMUOVE QUOTIDIANAMENTE I DEPOSITI MUCO-PROTEICI

Proprietà: la soluzione unica CONTACTA SOLUTION grazie alla sinergia che si determina tra i principi attivi e gli innovativi componenti presenta un'azione altamente disinfettante, preservante e conservante. E' una soluzione isotonica e isodrica rispetto alle cellule oculari per cui biotollerabile anche per occhi molto sensibili. Il validato potere detergente e proteo-mucoolitico rendono la lente molto idratata sia appena applicata che durante l'indosso giornaliero con conseguente migliore comfort. **Indicazioni:** è indicata per la conservazione, la disinfezione, il risciacquo, la detersione, l'idratazione, la rimozione giornaliera dei depositi muco-proteici di tutti i tipi di lenti a contatto morbide.

Istruzioni per l'uso

Metodo 5-7 minuti: lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito. Per evitare confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente. Rimuovere la lente dall'occhio e porla sul palmo della mano aggiungendo una quantità di CONTACTA SOLUTION sufficiente a bagnare completamente la lente. Strofinare delicatamente con un movimento "in avanti e indietro", entrambe le superfici della lente per almeno 10-15 secondi, utilizzando il dito dell'altra mano. Risciacquare accuratamente e abbondantemente la lente con CONTACTA SOLUTION in modo da rimuovere ogni traccia di depositi. Porre la lente nell'apposito contenitore. Ripetere per l'altra lente. Riempire il contenitore con CONTACTA SOLUTION sino alla linea di dosaggio. Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 5-7 minuti. Prima di applicare negli occhi, risciacquare con CONTACTA SOLUTION.

Metodo "DON'T TOUCH": lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito. Per evitare confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente. Dopo l'uso, togliere la lente dall'occhio e riporla subito nell'apposito contenitore riempito con CONTACTA SOLUTION sino alla linea di dosaggio.

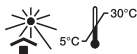

30°C

5°C



ESOFORM S.r.l.
Viale del Lavoro, 10 45100 Rovigo - Italia

Distribuito da
Fidia farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) - Italia

per tutti i tipi di lenti a contatto morbide

Solution

Ripetere per l'altra lente. Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 2-3 ore o per tutta la notte. Prima di applicarle, risciacquare con CONTACTA SOLUTION. **Controindicazioni:** non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente. **Precauzioni:** CONTACTA SOLUTION, una volta aperta, deve essere utilizzata entro tre mesi. L'eventuale residuo deve essere eliminato. Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non può essere garantita la sterilità. Per evitare qualsiasi contaminazione, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie. Chiudere bene il flacone dopo l'uso. Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque al di sotto di 30°C. Non usare dopo la scadenza.

Avvertenze: per lenti rimaste per più di 3-4 settimane nella soluzione CONTACTA SOLUTION prima dell'uso: eliminare la soluzione dal contenitore e procedere alla disinfezione almeno secondo il Metodo 5-7 minuti. Non utilizzare in caso di ipersensibilità specifica verso qualche componente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare sempre soluzione fresca, eliminando quella rimasta nel contenitore portalenti. Non sostituire con un diverso prodotto disinfettante. Consultare il Professionista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti a contatto. Non utilizzare mai acqua del rubinetto per le lenti a contatto morbide. **Complicanze:** in caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista. **Composizione:** PolEsaMetilienBiguanide: 0.0001%; EDTA bicalcico: 0.1%; Tensioattivi anfo-cationici 1.001%. Ecipienti e Acqua q.b. a 100%.



Seguire attentamente quanto riportato in etichetta. Conservare la presente etichetta. **Validità del prodotto:** 3 anni, se in confezione integra e correttamente conservato.



LOT



100 ml e

MADE IN ITALY

ETC1300290/A - COD. 10402E130 rev. 04/01/2021