

CONTACTA SOLUTION YAL

è una Soluzione Unica con IALURONATO DI SODIO per la disinfezione, la conservazione, la detersione, il risciacquo, l'idratazione di tutte le lenti a contatto morbide. Rimuove le proteine, speciale per occhi sensibili. Attiva in 5-7 minuti.

SOLUZIONE UNICA CON IALURONATO DI SODIO

Proprietà: CONTACTA SOLUTION YAL ha un'azione altamente disinfettante, conservante, umettante e detergente. Con Sodio ialuronato. Questo polimero dalle elevate proprietà viscoelastiche migliora la lubrificazione e la biotollerabilità delle lenti, grazie alla sua capacità di trattenere acqua. CONTACTA SOLUTION YAL idrata le lenti sia appena applicate che durante l'indosso giornaliero con conseguente comfort duraturo e riduzione di secchezza ed irritazione. Il pH e l'osmolarità sono tali da essere adeguatamente biocompatibili con i tessuti e con i liquidi organici oculari. **Indicazioni:** è indicata per la conservazione, la disinfezione, il risciacquo, la detersione, l'idratazione, la rimozione giornaliera dei depositi muco-proteici di tutti i tipi di lenti a contatto morbide.

Istruzioni per l'uso

Metodo 5-7 minuti

Lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito.

Per evitare confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente.

Rimuovere la lente dall'occhio e porla sul palmo della mano aggiungendo una quantità di CONTACTA SOLUTION YAL sufficiente a bagnare completamente la lente. Strofinare delicatamente con un movimento "in avanti e indietro", entrambe le superfici della lente per almeno 10-15 secondi, utilizzando il dito dell'altra mano. Risciacquare accuratamente e abbondantemente la lente con CONTACTA SOLUTION YAL in modo da rimuovere ogni traccia di depositi. Porre la lente nell'apposito contenitore. Ripetere per l'altra lente. Riempire il contenitore con CONTACTA SOLUTION YAL sino alla linea di dosaggio. Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 5-7 minuti. Prima di applicarle negli occhi, risciacquare con CONTACTA SOLUTION YAL.

Metodo "DON'T TOUCH"

Lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito. Per evitare



ESOFORM S.r.l.
Viale del Lavoro, 10 45100 Rovigo - Italia

Distribuito da
Fidia farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) - Italy

per tutti i tipi di lenti a contatto morbide

CONTACTA
Solution Yal

360 ml e

confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente. Dopo l'uso, togliere la lente dall'occhio e riportarla subito nell'apposito contenitore riempito con CONTACTA SOLUTION YAL sino alla linea di dosaggio.

Ripetere per l'altra lente. Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 2-3 ore o per tutta la notte. Prima di applicarle, risciacquare con CONTACTA SOLUTION YAL.

Controindicazioni: non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente. **Precauzioni:** CONTACTA SOLUTION YAL, una volta aperta, deve essere utilizzata entro tre mesi. L'eventuale residuo deve essere eliminato. Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non può essere garantita la sterilità. Per evitare qualsiasi contaminazione, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie. Chiudere bene il flacone dopo l'uso. Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque al di sotto di 30°C. Non usare dopo la scadenza.

Avvertenze: per lenti rimaste per più di 3-4 settimane nella soluzione CONTACTA SOLUTION YAL prima dell'uso, eliminare la soluzione dal contenitore e procedere alla disinfezione almeno secondo il Metodo 5-7 minuti. Non utilizzare in caso di ipersensibilità specifica verso qualche componente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare sempre soluzione fresca, eliminando quella rimasta nel contenitore portalenti. Non sostituire con un diverso prodotto disinfettante. Consultare il Professionista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti a contatto. Non utilizzare mai acqua del rubinetto per le lenti a contatto morbide.

Complicanze: in caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista. **Composizione:** PoliEsaMetilenBisguanide 0.0001%, EDTA bisodico 0.1%, Sodio ialuronato 0,01%, Eccipienti e Acqua depurata q.b. a 100%.



Seguire attentamente quanto riportato in etichetta. Conservare la presente etichetta.

Validità del prodotto: 3 anni, se in confezione integra e correttamente conservato.



MADE IN ITALY

LOT

