

CONTACTA®

Sollievo lenti

Soluzione oftalmica a base di Lipidure® 2,0% e Ipromellosa 0,1%. Senza conservanti.
10 mL

Descrizione del prodotto

Contacta Sollievo Lenti è una soluzione oftalmica isotonica sterile a base di Lipidure® 2,0% e Ipromellosa 0,1%, senza conservanti, utile all'integrazione della secrezione lacrimale e al ripristino delle condizioni fisiologiche del film lacrimale.

Contacta Sollievo Lenti protegge e lubrifica la superficie dell'occhio, procurando sollievo da stress ambientale e meccanico in particolare nei portatori di lenti a contatto.

Lipidure® è un polimero sintetico in grado di ricoprire e proteggere sia le cellule epiteliali corneali che la lente a contatto dal danno da essiccazione. Lipidure® è utile per prevenire danni alla superficie oculare nei portatori di lenti a contatto.

L'ipromellosa è un polimero cellulosico costituito da unità polimeriche collegate tra loro in grado di trattenere l'acqua, formando un composto idrofilo, biocompatibile, solubile in acqua.

Al flacone di **Contacta Sollievo Lenti** è applicato il contagocce OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) che, tramite il suo sistema di filtro assoluto, garantisce il mantenimento della sterilità del prodotto senza l'utilizzo di conservanti.

Composizione

Componenti principali: Lipidure® 2,0%, Ipromellosa 0,1%.

Altri componenti: Sodio cloruro, Potassio cloruro, Acido bórico, Sodio idrossido, Acqua per preparazioni iniettabili.

Destinazione d'uso

Sostituto lacrimale stabilizzante del film lacrimale e lubrificante della superficie oculare.

Indicazioni

Alterazioni del film lacrimale causate da stress ambientale e meccanico, in particolare nei portatori di lenti a contatto.

Popolazione target


Contacta Sollievo Lenti è indicato per pazienti adulti affetti da alterazioni del film lacrimale causata da stress ambientale e meccanico, in particolare nei portatori di lenti a contatto.

Posologia e modalità di somministrazione

Instillare 1 goccia nel sacco congiuntivale 3 volte al giorno per un periodo non superiore ai 30 giorni o secondo parere medico.

Il prodotto può essere instillato anche quando si indossano le lenti a contatto.

- Al primo utilizzo rimuovere l'anello di plastica che sigilla il tappo tirando la linguetta laterale (1).
- Sollevare e togliere il tappo (2).
- Per familiarizzare con la corretta pressione da applicare sul flacone, erogare una singola goccia su un tessuto di carta (3).
- Capovolgere il flacone sopra l'occhio e con il dito indice e pollice applicare una pressione crescente sui lati fino alla fuoriuscita della goccia. È possibile che con l'esaurirsi della soluzione contenuta nel flacone sia necessario applicare una forza maggiore (4).
- Richiudere il flacone con il tappo (5).

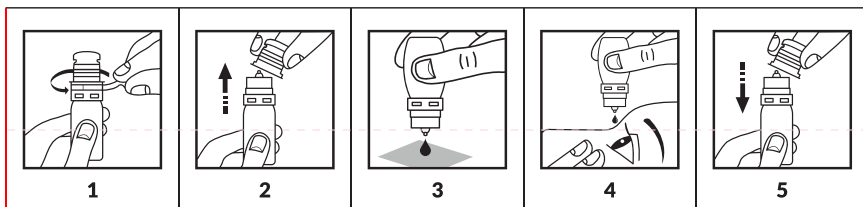

Controindicazioni

Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Precauzioni ed avvertenze

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno (superficie dell'occhio).
- Per evitare il rischio di infezioni, il prodotto è destinato ad essere utilizzato da un solo paziente.
- Per eliminare il rischio di contaminazione della soluzione, evitare che il contagocce entri in contatto con l'occhio o con altri oggetti.
- Per evitare lesioni della superficie oculare evitare che durante l'instillazione il contagocce entri in contatto con l'occhio.
- Con il progressivo esaurimento della soluzione nel flacone sarà necessario applicare maggior forza per determinare

l'uscita della goccia. Si consiglia di modulare la pressione da esercitare sul flacone in modo da evitare una erogazione eccessiva rispetto a quanto indicato.

- Richiudere bene il flacone dopo l'uso. Il tappo al suo interno presenta un rivestimento che permette di assorbire eventuali gocce residue.
- Non sono note interazioni di **Contacta Sollievo Lenti** con farmaci o altri prodotti topici oftalmici; tuttavia, si consiglia di consultare il medico in caso di utilizzo concomitante di altri prodotti oftalmici topici per indicazioni specifiche sulle tempistiche di somministrazione.
- Non utilizzare il prodotto se il flacone è danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- In caso di qualsiasi effetto indesiderato, sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico.
- Conservare l'astuccio e il foglietto illustrativo durante tutto il periodo di utilizzo del dispositivo.
- Smaltire il flacone chiuso con l'eventuale contenuto residuo secondo la normativa locale vigente.

Utilizzo in popolazioni speciali

Data la presenza di Acido bórico, il prodotto è controindicato nei bambini al di sotto dei 2 anni, in caso di gravidanza e allattamento. Nei pazienti dai 2 ai 18 anni, consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto, poiché la sicurezza e l'efficacia di **Contacta Sollievo Lenti** in questi casi non sono state stabilite.

Effetti indesiderati

Dopo l'applicazione del prodotto può verificarsi un lieve e passeggero offuscamento visivo.

ATTENZIONE: l'utilizzatore è tenuto a segnalare ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al Fabbricante e all'Autorità competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore ha sede. Segnalare gli incidenti gravi al Fabbricante al seguente indirizzo e-mail: phv@fdiapharma.it

Modalità di conservazione

Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta del flacone. Dopo prima apertura, il prodotto può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata sul confezionamento. Non disperdere nell'ambiente.

Presentazione

Confezione contenente un flacone OSD da 10 mL.

Data e revisione del foglietto illustrativo:

Novembre 2023 rev. 01

 **Fidia farmaceutici S.p.A.**
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) - Italy
Tel. +39 049 8232111
www.fdiapharma.com



Lipidure is a registered trademark of NOF CORPORATION in Italy

	Attenzione
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Data di scadenza
	Codice del lotto
	Non utilizzare se l'imballaggio non è integro e consultare le istruzioni per l'uso
	Sterilizzato utilizzando tecniche di fabbricazione asettiche
	Sistema a barriera sterile singola

	Limite di temperatura
	Fabbricante
	Data di produzione
	Dispositivo medico
	Unique Device Identifier
	Contiene sostanze pericolose (Acido bórico)
	Numero del modello